

2020年08月07日作成（第一版）

医療用品 04 整形用品
高度管理医療機器 気管食道用スピーチバルブ 36245000
（一般医療機器 液体包帯 33584000）

プロヴォックス Vega（スキンバリア）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

- ・過敏な皮膚又は傷のある皮膚へは使用しないでください。
- ・本品に皮膚アレルギーの既往歴のある方は使用しないでください。初めてご使用になる場合は、少量で試用いただき、発赤などアレルギー症状が出ないことを確認してください。

【形状・構造及び原理等】

<形状>



<原材料>

スキンバリアの接触面：ヘキサメチルジシロキサン、イソプロピルミリスチン酸、トリメチルシロキシケイ酸

【使用目的又は効果】

本品は皮膚を保護する包帯剤として使用する。

使用目的又は効果に関連する使用上の注意

本品はアドヒーシブ（別売）と肌の間にバリアを形成することで、喉頭摘出者の肌を保護します。

【使用方法等】

使用方法

- 1) アドヒーシブ（別売）を貼る永久気管孔周りの肌の状態を確認します。
傷があるときは本品の使用を控えてください。
- 2) 本品を使用する前に肌を清浄にして乾燥させます。
- 3) 本品を塗り乾燥させます。
- 4) アドヒーシブを貼ります。
- 5) アドヒーシブを剥がす際にはアドヒーシブリムーバー（別売）を使用する。

使用方法に関連する使用上の注意

- ・皮膚に油分、水分などが付着した状態で本品を使用しないでください。
- ・皮膚表面を完全に乾燥させてから本品を使用してください。
- ・肌にケガをしているとき、創傷部（皮膚粘膜）に直接塗らないでください。
- ・感染のおそれがあるため、他の方と共有しないでください。
- ・破片を吸い込むおそれがあるため、本品を細かく裁断しないでください。
- ・目に入らないように使用してください。万一、誤って入ってしまった場合は、水でよく洗い流してください。
- ・子どもの手の届かない場所に保管してください。

- ・本品は開封後、染み込んでいる液体成分が自然蒸発するため、塗っている間は強く息を吸い込まないように注意してください。
- ・塗っている間は本品及び本品の液体成分が永久気管孔内に入り込んでしまわないよう注意してください。
- ・塗布後、炎症や発赤がみられる場合は使用を中止し、それらの症状が続く場合には医師へ相談してください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管してください。
- ・傾斜、振動、衝撃等のない安定した場所で保管してください。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管してください。

<有効期間（未開封状態）>

- ・本品の外箱に記載されている表示をご確認ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社アトスメディカルジャパン TEL 03-4589-2830

ホームページアドレス：<https://www.atosmedical.jp>

製造業者：ATOS Medical AB（スウェーデン）

Atos

取扱説明書を必ずご参照下さい。