


## Dagelijkse verzorging van uw stemprothese met de Provox® Flush




Reinig uw stemprothese 's-morgens en 's-avonds en na elke maaltijd met de Provox Brush en de Provox Flush.

1. Gebruik de Provox Flush met drinkwater of lucht. Gebruik geen andere vloeistoffen dan water.

Tip: Als u de Flush met water wilt gebruiken, oefen dan eerst met lucht. Als dit goed gaat, kunt u het met water proberen.

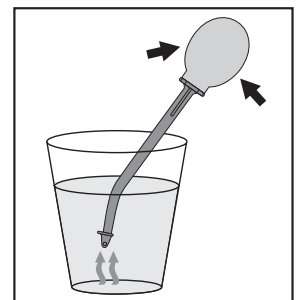

2. Dompel het uiteinde van de Flush in een glas schoon water en knijp in de siliconen ballon. De ballon zal zich volzuigen met water.
3. Plaats het puntige uiteinde van de Flush in de stemprothese. Zorg dat er een goede afsluiting is. Houd de Flush stevig op zijn plaats met de ene hand.

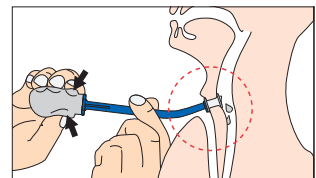

Tip: De steel van de Flush kan gebogen worden om de stemprothese beter te kunnen bereiken.

4. Gebruik uw andere hand om in de ballon te knijpen. Knijp het water (of de lucht) rustig in de stemprothese.
5. Stop met knijpen en kantel de Flush naar boven en beneden. De ballon zal zich weer vullen met lucht. Verwijder de Flush uit de stemprothese.
6. Verwijder de ballon van de steel van de Flush. Reinig beide delen met drinkwater en wat afwasmiddel om slijmresten of voedseldeeltjes te verwijderen. Laat de onderdelen los van elkaar, aan de lucht drogen.
7. Desinfecteer de Provox Flush dagelijks volgens de aanwijzingen in de producthandleiding.

