

Votre prothèse phonatoire présente-t-elle une fuite ?



Souffrez-vous de :

1. toux en mangeant/buvant ou après un repas ?
2. mucus coloré par la nourriture/boissons ?
3. l'augmentation de sécrétions ?
4. d'infections pulmonaires plus fréquentes ?

Si vous répondez OUI à une ou plusieurs de ces questions, vous avez probablement des fuites au niveau de votre prothèse phonatoire

Comment vérifier votre prothèse

Test de fuite

1. Placez-vous devant un miroir avec une bonne lumière et nettoyez votre prothèse
2. Prenez une gorgée d'une boisson colorée (ex : café, lait, ce sera plus facile à voir)
3. Regardez et vérifiez si quelque chose coule à travers ou autour de votre prothèse. Si vous avez des difficultés à voir votre prothèse, demandez à une autre personne de regarder pour vous

Fuite

1. Nettoyez la prothèse en utilisant la brosse Provox Brush ou le Provox Flush comme décrit dans les manuels d'utilisation.
2. Répétez le test de déglutition décrit plus haut.

Fuite

Fuite à travers

1. Insérer le bouchon Provox Plug dans votre prothèse comme décrit dans le manuel d'utilisation
2. Contactez votre médecin pour fixer un rendez-vous pour remplacer votre prothèse

Fuite autour

1. Contactez votre médecin pour fixer un rendez-vous

Pas sûr

1. Insérer le bouchon Provox Plug dans votre prothèse comme décrit dans le manuel d'utilisation
2. Répétez le test de déglutition

Fuite

La fuite est autour

1. Retirez le bouchon Provox Plug comme décrit dans le manuel d'utilisation.
2. Contactez votre médecin pour fixer un rendez-vous.

Pas de fuite

La fuite est à travers

1. Contactez votre médecin pour fixer un rendez-vous pour remplacer votre prothèse.
2. Utilisez le bouchon Provox Plug quand vous buvez et mangez, jusqu'à ce qu'une nouvelle prothèse soit mise en place.

Pas de fuite

Contactez votre médecin et expliquez lui votre problème en précisant que vous avez vérifié qu'il n'y avait pas de fuite au niveau de votre prothèse phonatoire

Pas de fuite

Votre prothèse phonatoire peut être encombrée par de la nourriture ou du mucus ce qui empêche la valve de se fermer convenablement. Nettoyez votre prothèse phonatoire au minimum deux fois par jour et après chaque repas. Si vous n'utilisez pas la poire de rinçage Provox Flush, demandez à votre médecin si vous pourriez l'utiliser en combinaison avec la brosse Provox Brush. Si le problème persiste, contactez votre médecin.

